

# 平安錶 Care+ 銀髮健康 AI 管理手錶使用說明

請您在使用之前認真閱讀使用說明書，並妥善保存，以便快速正確安裝和使用！

1. 本著不斷完善與持續優化的原則，本公司保留在不預先通知的情況下，對文檔中描述的任何內容與產品資訊以及功能進行修改和改進的權利。
2. 由於產品不斷完善優化與升級更新，實際操作可能與本說明書描述略有差異，請以實際操作為準。

## 一、使用前準備：

1. 檢測設備是否相符，檢查配件等是否齊全。
2. 請準備一張中華電信/台哥大或遠傳 4G 的 Nano SIM 卡（建議購買預付卡），確認 SIM 卡開通網路流量、volte、來電顯示功能。
3. 安裝及操作若有疑問，請於 LINE 官方帳號：@lsaicare 留下訊息，我們會有專人為您服務。

## 二、安裝 SIM 卡：

裝/取卡前請先將手錶關機並斷開充電裝置，然後將手錶側面 SIM 卡槽蓋子及卡托一起拉出並取下，對照卡托缺口的方向把 SIM 卡晶片面朝上放入卡托，再把卡托及蓋子插回手錶側面。

※ 注意：插卡方向插錯可能會造成不讀卡或損壞手錶。※

## 三、給手錶充電：

首次使用手錶前，建議先充電 2 小時，確保手錶所有功能可以正常運作。

當手錶提示電量低時，就需要對手錶進行充電了。接入磁吸充電線連上充電電源，螢幕顯示充電禁用，表明設備正在充電；顯示已充滿時，則表示充電已完成。

電量低於 15% 時，手錶只能接聽電話(其它功能無法使用)。（注意：手錶充電時禁止使用該手錶）如電量低於 1%，充電時螢幕無法立刻顯示，需持續充電 1 小時左右，才能正常開機喚醒螢幕。

**注意：**磁吸充電線接頭和手錶充電介面內均含有磁鐵，請勿與其他金屬接觸，以免短路導致損壞。

**注意：**請勿經常讓手錶電源低於 20%，以免電池過度放電影響使用壽命。

## 四、開/關機：

開機：手錶關機情況下，長按開機鍵可以開機。

關機：可在手錶端設置功能頁面裡面選擇關機、並點擊確認關機；

另外，不插卡情況下，長按電源開/關機鍵，彈出關機畫面並點擊確認關機。

## 五、加入 line 官方帳號：

1. 請在您的 line 添加好友，搜尋龍平安智能官方 line ID: @lsaicare，即可加入好友。
2. 或者 line 首頁中間”服務”右滑點選「官方帳號」，輸入@lsaicare 或 龍平安智能，也可以加入好友。

## 六、登入管理後台：

請依照龍平安智能提供給您的帳號密碼，前往 <https://aicare.lsaicare.com/> 登入您設備後台；登入後需要閱讀消費者權益說明，並綁定您的 email 電子信箱。

登入後台後，您智慧手錶後台請點選 **SOS 智慧定位防詐手錶**。

# 平安錶 Care+ 銀髮健康 AI 管理手錶使用說明

## 七、手錶介紹：



## 八、手錶主要功能介紹：

安全守護：SOS 一鍵求救、跌倒警報。

健康管理：運動計步、心率量測、血壓量測、血氧量測、體溫量測、睡眠統計、吃藥提醒、久坐提醒。

## 九、故障排除：

智慧手錶首次開機無法正常使用時，請檢查：

- 1) 手錶裡面的SIM卡是否安裝方向正確？安裝時需對照卡托缺口的方向把SIM卡晶片面朝上放入卡托，再把卡托及蓋子插回手錶側面。
- 2) 檢查SIM卡是否有網路流量？預付卡儲值不一定內含網路流量，需要開通網路才能在智慧手錶使用。
- 3) 磁吸充電時是否方向正確？磁吸方向正確才能正常充電，手錶螢幕會顯示充電中勿用。

## 九、安全警告：

- 1) 本產品不適合 12 歲以下兒童獨自使用。
- 2) 所有包裝物料（如膠帶、塑膠袋、塑膠片、標籤、捆綁線…等）以及機器的細小零件，勿讓 3 歲以下兒童接觸，以免發生窒息危險。
- 3) 請保持設備乾燥，避免在雷雨天氣使用設備。
- 4) 請勿將設備存放過熱或過冷環境中，勿摔落，擠壓，碰撞，刮傷設備。
- 5) 使用手錶通話時，務必要將設備距離頭部 20 公分以上。